

NÁVOD NA POUŽITÍ ORTÉZY

Vážená klientko, kliente,



děkujeme Vám, že jste si nechal(a) zhotovit ORTÉZU HORNÍ KONČETINY Z NEOPRENU (loket, zápěstí, ruka) v naší firmě, která se specializuje na výrobu ortopedicko-protetických pomůcek na zakázku. Protože naším cílem je Vaše plná spokojenost, dovoluujeme si Vás upozornit na zásady správného používání a údržbu výrobku, který slouží jako léčebný zdravotnický prostředek.

Popis

Tento zakázkový výrobek je určen pro fixaci nebo korekci horní končetiny v určitém postavení dle doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře. Je součástí komplexní léčby a svým účinkem podporuje nedostatečnou funkci končetiny, zajišťuje její vhodné postavení nebo naopak omezuje nežádoucí aktivitu v postižené oblasti. Konstruktivní základ ortézy tvoří vysoce kvalitní neoprenový materiál, který je případně doplněn o lycru, nylon, spandex, suché zipy a peloty z nízkoteplotního plastu. Ortézu aplikuje a její dodatečné úpravy provádí na základě indikujícího lékaře výhradně odborný pracovník.

Použití

Po nasazení ortézy musí dojít k rovnoměrnému dosednutí na končetinu, dbejte na to, aby neseděla příliš těsně a nebránila tak cirkulaci krve. Postupným dotažením popruhů ortézy zajistíte proti rotaci nebo sjíždění. Po dotažení nesmí ortéza způsobovat otlaky nebo nadměrné dráždění pokožky. Pokud při užívání dojde k jakýmkoliv obtížím, vždy kontaktujte výrobce.

Typ ortézy

Účel ortézy

Kdy používat? Den Noc Během funkčních aktivit Sundat při cvičení a hygieně Neodstraňovat při cvičení Jak často používat?

Údržba

Pomůcka je určena pouze k ručnímu praní s použitím pH neutrálního tekutého mýdla nebo šamponu určeného k ošetření neoprenových materiálů. Následně opláchněte v čisté vodě, s maximální teplotou do 40 st.C. Hrubší nečistoty očistěte měkkým kartáčkem. Neperte v pračce a nesušte v sušičce, po vyprání ortézu pouze osušte a nechejte vyschnout z obou stran. Chemicky nečistěte a dlouhodobě nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nezasahujte do konstrukce ortézy!



Případné alergické reakce se obvykle objevují během prvních několika hodin. Reakce, ke kterým dojde o dny nebo týdny později, lze často připsat horku, vlhkosti nebo problémům s hygienou končetiny. Produkty pravidelně perte, abyste se tomuto problému vyhnuli. Pokud se objeví neobvyklý otok, změna barvy kůže, vyrážka nebo nepříjemné pocity, přerušte používání a poraďte se s lékařem.

Ortéza není určena pro osoby, které mají alergickou reakci na neopren nebo sklony k rozvoji dermatitidy. Ortézu nepoužívejte ani tehdy, pokud je povrch kůže jakkoli narušen, např. máte-li otevřené rány nebo jinak poškozenou kůži. Pokud je již zakázkový výrobek zastaralý, nefunkční, jeho likvidaci zajistí výrobce, ke kterému je potřeba výrobek doručit.

Pokud je již zakázkový výrobek zastaralý, nefunkční, jeho **likvidaci** zajistí výrobce, ke kterému je potřeba výrobek doručit.

Jakýkoliv závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti s tímto zakázkovým prostředkem, by měl být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu.



Ergona Opava s.r.o., Krnovská 2539/3, 746 01 Opava – Předměstí. Tel: 553 62 24 42, 773 55 35 93
Datum vydání návodu k použití: 26.5. 2021