

**Jméno a příjmení:** .....

**Datum a místo předání :** .....

**Terapeut:** .....

## Návod na použití ortézy

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si nechal zhotovit **ORTÉZU KONČETINOVOU PRO ZÁPĚSTÍ A RUKU Z NÍZKOTEPLONÍHO TERMOPLASTU** v naší firmě, která se specializuje na výrobu ortopedicko-protetických pomůcek na zakázku. Protože naším cílem je Vaše plná spokojenost, dovolujeme si Vás upozornit na zásady správného používání a údržbu výrobku, který slouží jako léčebný zdravotnický prostředek.

### Popis

Tento zakázkový výrobek je určen pro fixaci nebo korekci horní končetiny v určitém postavení dle doporučení Vašeho terapeuta a ošetřujícího lékaře. Je součástí komplexní léčby a svým účinkem podporuje nedostatečnou funkci končetiny, zajišťuje její vhodné postavení nebo naopak omezuje nežádoucí aktivitu v postižené oblasti. Konstrukční základ ortézy tvoří nízkoteplotní plast, který je případně doplněn o dynamický tahový systém nebo další součásti. Ortéza je tvarována přímo na Vaší končetině, tudíž přesně respektuje její anatomii. Ortézu aplikuje a její dodatečné úpravy provádí na základě indikujícího lékaře výhradně odborný pracovník.

### Použití

Typ ortézy .....

Účel ortézy .....

### Kdy používat?

- Den     Noc     Během funkčních aktivit     Sundat při cvičení a hygieně     Neodstraňovat při cvičení

**Jak často používat?** .....

Po nasazení ortézy musí dojít k rovnoměrnému dosednutí na končetinu. Postupným dotažením popruhů zajistíme ortézu proti rotaci nebo sjíždění. Po dotažení nesmí ortéza způsobovat tlaky nebo nadměrné dráždění pokožky. Pokud při užívání dojde k jakýmkoliv obtížím, vždy kontaktujte výrobce (kontakt je uveden v zápatí návodu).

**Zeptejte se svého terapeuta nebo lékaře, zda jste schopni řídit automobil nebo pracovat s ortézou.**

### Údržba

Nenechávejte ortézu v blízkosti zdrojů vytápění, v autě nebo za oknem na přímém slunci. V případě potřeby chraňte v tepelně izolačním obalu. K čištění ortézy používejte vlažnou nebo studenou vodu, nikoliv horkou. Nepoužívejte tuhé mýdlo, syké prášky na praní ani rozpouštědla, pouze tekuté mýdlo s neutrálním pH faktorem. Nežehlete suché zipy. Po umytí ortézu dokonale vysušte ručníkem, případně chladným fénem. Nezasahujte do konstrukce ortézy!

Pokud je již zakázkový výrobek zastaralý, nefunkční, jeho likvidaci zajistí výrobce, ke kterému je potřeba výrobek doručit.

**Užitná doba pomůcky je 12 měsíců.**

Jakýkoliv závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti s tímto zakázkovým prostředkem, by měl být nahlášen výrobcem a příslušnému orgánu.

Datum vydání návodu k použití: 26. 5. 2021.

Ergona Opava s.r.o., Krnovská 2539/3, 746 01 Opava – Předměstí.

Tel: 553 62 24 42, 773 55 35 93, [info@protetika-ergona.cz](mailto:info@protetika-ergona.cz), [www.protetika-ergona.cz](http://www.protetika-ergona.cz)