

## Návod na použití ortézy

**Vážený zákazníku,**

**děkujeme Vám, že jste si nechal zhotovit ORTÉZU KONČETINOVOU PRO ZÁPĚSTÍ A RUKU Z NÍZKOTEPLNÍHO TERMOPLASTU v naší firmě, která se specializuje na výrobu ortopedicko-protetických pomůcek na zakázku. Protože naším cílem je Vaše plná spokojenost, dovoluujeme si Vás upozornit na zásady správného používání a údržbu výrobku, který slouží jako léčebný zdravotnický prostředek.**

### Popis

Tento zakázkový výrobek je určen pro fixaci nebo korekci horní končetiny v určitém postavení dle doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře. Je součástí komplexní léčby a svým účinkem podporuje nedostatečnou funkci končetiny, zajišťuje její vhodné postavení nebo naopak omezuje nežádoucí aktivitu v postižené oblasti. Konstrukční základ ortézy tvoří nízkoteplotní plast, který je případně doplněn o dynamický tahový systém nebo další součásti. Ortéza je tvarována přímo na Vaší končetině, tudíž přesně respektuje její anatomii. Ortézu aplikuje a její dodatečné úpravy provádí na základě indikujícího lékaře výhradně odborný pracovník.

### Použití

Typ ortézy

.....

Účel ortézy

.....

Kdy používat?    Den   Noc   Během funkčních aktivit   Sundat při cvičení a hygieně   Neodstraňovat při cvičení

Jak často používat?

.....

Po nasazení ortézy musí dojít k rovnoměrnému dosednutí na končetinu. Postupným dotažením popruhů zajistíme ortézu proti rotaci nebo sjíždění. Po dotažení nesmí ortéza způsobovat otlaky nebo nadměrné dráždění pokožky. Pokud při užívání dojde k jakýmkoliv obtížím, vždy kontaktujte výrobce.

*Zeptejte se svého lékaře, zda jste schopni řídit automobil nebo pracovat s ortézou.*

### Údržba

Nenechávejte ortézu v blízkosti zdrojů vytápění, v autě nebo za oknem na přímém slunci. V případě potřeby chraňte v tepelně izolačním obalu. K čištění ortézy používejte vlažnou nebo studenou vodu, nikoliv horkou. Nepoužívejte tuhé mýdlo, sypké prášky na praní ani rozpouštědla, pouze tekuté mýdlo s neutrálním pH faktorem. Nežehlete suché zipy. Po umytí ortézu dokonale vysušte ručníkem, případně chladným fénem.

Nezasahujte do konstrukce ortézy!

Pokud je již zakázkový výrobek zastaralý, nefunkční, jeho likvidaci zajistí výrobce, ke kterému je potřeba výrobek doručit.

***Jakýkoliv závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti s tímto zakázkovým prostředkem, by měl být nahlášen výrobcem a příslušnému orgánu.***

Datum vydání návodu k použití: 26. 5. 2021.