

NÁVOD: ORTÉZA TRUPOVÁ – BEDERNÍ PÁS

Popis: Tento zakázkový zdravotnický prostředek je určen pro zpevnění bederní oblasti zad. Bederní pás je zhotoven z elastického vysoce prodyšného materiálu. V oblasti zad je pás vyztužen pružnými pelotami. Přídavný tah zvyšuje variabilitu a možnost volitelného předpětí tahu. Tahový díl umožňuje regulovat utažení pásu.

Při používání a údržbě bederního pásu dbejte těchto zásad:

Bederní pás připevníme na trup pomocí uzávěrů ze suchých zipů. Při nasazení je potřeba kontrolovat rozložení výztuží v ose páteře. Ortézu aplikuje na základě měr odborný pracovník.



Údržba: Údržbu provádět pouze ručním praním pomocí mýdla při teplotě do 40 C. Při znečištění suchých zipů je nutno tyto vyčistit a tím udržet zavírací schopnost materiálu.

Pokud je již zakázkový výrobek zastaralý, nefunkční, jeho **likvidaci** zajistí výrobce, ke kterému je potřeba výrobek doručit.

Jakýkoli závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti s tímto zakázkovým prostředkem, by měl být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu.



Ergona Opava s.r.o., Krnovská 2539/3, 746 01 Opava – Předměstí. Tel: 553 62 24 42, 773 55 35 93
Datum vydání návodu k použití: 26.5. 2021

NÁVOD: ORTÉZA TRUPOVÁ – KRČNÍ LÍMEC

Popis: Tento zakázkový zdravotnický prostředek je určen pro zpevnění páteře v oblasti krčních obratlů. Ortéza je zhotovena z vyměkčeného materiálu a je zpevněna plastovou výztuhou. Potažena je textilním materiálem se zapínáním na suchý zip.

Při používání a údržbě krčního límce dbejte těchto zásad:

Ortézu nasazujeme projmutou částí pod bradu. Ortéza podpírá rovnoměrně hlavu pod bradou pod čelistmi a pod týlní kostí. Ortéza způsobuje přiměřenou fixaci proti pohybu ve všech směrech.



Údržba: Údržba límce je možná pouze ručním praním ve vlažné vodě. Nadměrně vysoká teplota může způsobit poškození materiálu ortézy. Při znečištění suchých zipů je nutno tuto část vyčistit kartáčkem a tím udržet zavírací schopnost.

Pokud je již zakázkový výrobek zastaralý, nefunkční, jeho **likvidaci** zajistí výrobce, ke kterému je potřeba výrobek doručit.

Jakýkoli závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti s tímto zakázkovým prostředkem, by měl být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu.



Ergona Opava s.r.o., Krnovská 2539/3, 746 01 Opava – Předměstí. Tel: 553 62 24 42, 773 55 35 93
Datum vydání návodu k použití: 26.5. 2021

NÁVOD: ORTÉZA TRUPOVÁ – KRČNÍ LÍMEC

Popis: Tento zakázkový zdravotnický prostředek je určen pro zpevnění páteře v oblasti krčních obratlů. Ortéza je zhotovena z vyměkčeného materiálu a je zpevněna plastovou výztuhou. Potažena je textilním materiálem se zapínáním na suchý zip.

Při používání a údržbě krčního límce dbejte těchto zásad:

Ortézu nasazujeme projmutou částí pod bradu. Ortéza podpírá rovnoměrně hlavu pod bradou pod čelistmi a pod týlní kostí. Ortéza způsobuje přiměřenou fixaci proti pohybu ve všech směrech.



Údržba: Údržba límce je možná pouze ručním praním ve vlažné vodě. Nadměrně vysoká teplota může způsobit poškození materiálu ortézy. Při znečištění suchých zipů je nutno tuto část vyčistit kartáčkem a tím udržet zavírací schopnost.

Pokud je již zakázkový výrobek zastaralý, nefunkční, jeho **likvidaci** zajistí výrobce, ke kterému je potřeba výrobek doručit.

Jakýkoli závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti s tímto zakázkovým prostředkem, by měl být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu.




Ergona Opava s.r.o., Krnovská 2539/3, 746 01 Opava – Předměstí. Tel: 553 62 24 42, 773 55 35 93
Datum vydání návodu k použití: 26.5. 2021

NÁVOD: ORTÉZA TRUPOVÁ – STABILIZAČNÍ KORZET

Popis: Tento zakázkový zdravotnický prostředek je určen zejména pro pooperační a poúrazové stavy páteře, kompresní zlomeniny a poruchy disku, případně pro odlehčení a stabilizaci obratlů.

Použití: Tuto individuálně zhotovenou ortézu aplikuje za základě měř odborný pracovník.

Korzet se smí opírat těla pouze opěrnými pelotami s výstelkami, a to ve třech bodech: v hrudní oblasti, v oblasti spony stydkých kostí a na zádech v oblasti TL přechodu. Korzet nesmí tlačit zejména svými nebandážovanými částmi, např. v oblasti předních spin. Korzet je určen pouze pro stabilizaci ve vertikální poloze. Není určen pro delší polohu vleže a zejména ne pro sed. Sedání v korzetu může způsobit změnu jeho polohy na těle pacienta a tím např. následné otlaky. Fixace v korzetu je dosaženo zapnutím dopínací spony zadního popruhu.

 **POZOR** Při stožení pacienta se nesmí s touto sponou manipulovat – mohlo by dojít k uvolnění popruhu, zmenšení stupně fixace a poškození zdravotního stavu pacienta. v případě výrazného tlaku na tělo pacienta v místě opěrných ploch nebo zarudnutí pokožky a vzniku otlaků kontaktujte ošetřující personál. Pod korzet noste své spodní prádlo, nenoste jej přímo na těle.

Údržba: Plochy korzetu, které jsou ve styku s tělem pacienta, tzv. výstelky, doporučujeme čistit kartáčkem, mýdlem a vodou. Korzet je plně omývatelný, umožňuje např. sprchování pacienta. Po sprchování je nutné korzet osušit. Nepoužívejte k sušení fén, plamen ani jiné přímé zdroje tepla.

Pokud je již zakázkový výrobek zastaralý, nefunkční, jeho **likvidaci** zajistí výrobce, ke kterému je potřeba výrobek doručit.

Jakýkoli závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti s tímto zakázkovým prostředkem, by měl být nahlášen výrobcem a příslušnému orgánu.

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě se zákonem o technických požadavcích na výrobky č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.336/2004 Sb.



Ergona Opava s.r.o., Krnovská 2539/3, 746 01 Opava – Předměstí. Tel: 553 62 24 42, 773 55 35 93

Datum vydání návodu k použití: 26.5. 2021

Jméno a podpis pacienta:

Pacient poučen a pomůcku převzal dne: